

Programa para la detección de enfermedades endocrinas y metabólicas en periodo neonatal



3º día

48 horas de iniciar la alimentación

Toma de Muestras

Se realizará el 3º día de vida del bebé (tras 48 horas de iniciar la alimentación)

Ficha identificativa

Instrucciones para tomar la muestra de orina

1. El niño debe estar limpio y sin talco, cremas ni desinfectantes.
2. Coloque la tira de papel absorbente de orina sobre los genitales del bebé y cierre el pañal o colóquela en la zona del pañal mojado y presione.
3. Una vez que el papel esté bien impregnado, compruebe que no contiene heces, mercromina... Si el papel está manchado con heces repita la operación con la otra tira de papel.
4. Deje secar la tira de papel impregnada de orina a temperatura ambiente, escriba el nombre y apellidos del niño e introdúzcala en el sobre.

Instrucciones para tomar la muestra de sangre

1. Dar un ligero masaje en el talón y frote con un algodón empapado en alcohol, esperando a que éste SE EVAPORE.
2. La muestra debe obtenerse de la zona del pie señalada en el dibujo.
3. Colocar la tarjeta de forma que la superficie de los discos coincida con la gota de sangre y asegúrese QUE TRASPASA a la otra cara del papel, quedando impregnada toda la superficie.
4. **ATENCIÓN:** Es importante impregnar la totalidad de la superficie de los 4 discos por una sola cara, hasta que la sangre traspase a la otra cara.
5. Deje secar a temperatura ambiente, **NO APLICAR FUENTES EXTERNAS DE CALOR**, y rellene los datos del nombre y apellidos del bebé.

Ficha identificativa para anotar sus datos (dirección, teléfono familiar, y datos del bebé).

Lanceta
Lanceta para provocar un pequeño sangrado.

Tiras de papel
Tiras de papel absorbente para recoger la orina y las gotas de sangre.

Sobre
Sobre para enviar o entregar al laboratorio.